

Stacja dokująca (Docking Station)

do kardiomonitorów IntelliVue **X3** & MX100

Instrukcja montażu

MM & MM

Narzędzia

- Niezbędne narzędzia
(brak w zestawie):
 - Śrubokręt torx T20
 - Do zmiany położenia uchwytu
 - Do przykręcenia wieszaka na akcesoria



Pudełko z Docking Station




Pudełko z Docking Station



Wieszak na akcesoria
(do zamontowania)

Docking Station

W zestawie:

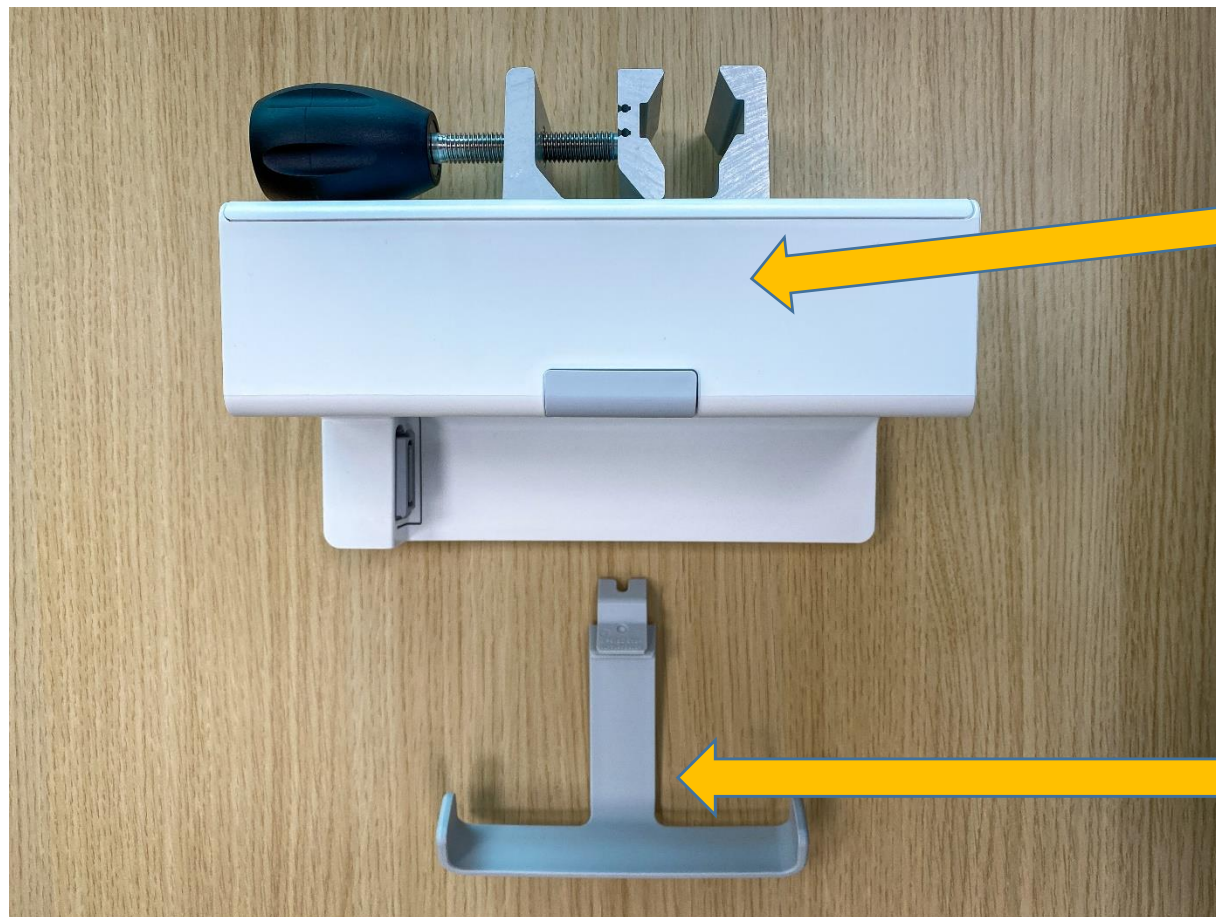

Docking Station

Wieszak na akcesoria

Kabel zasilający i pokrywka mocowania wieszaka



Kabel zasilający





Montaż wieszaka



Odkręcić i wyjąć śrubkę

Montaż wieszaka

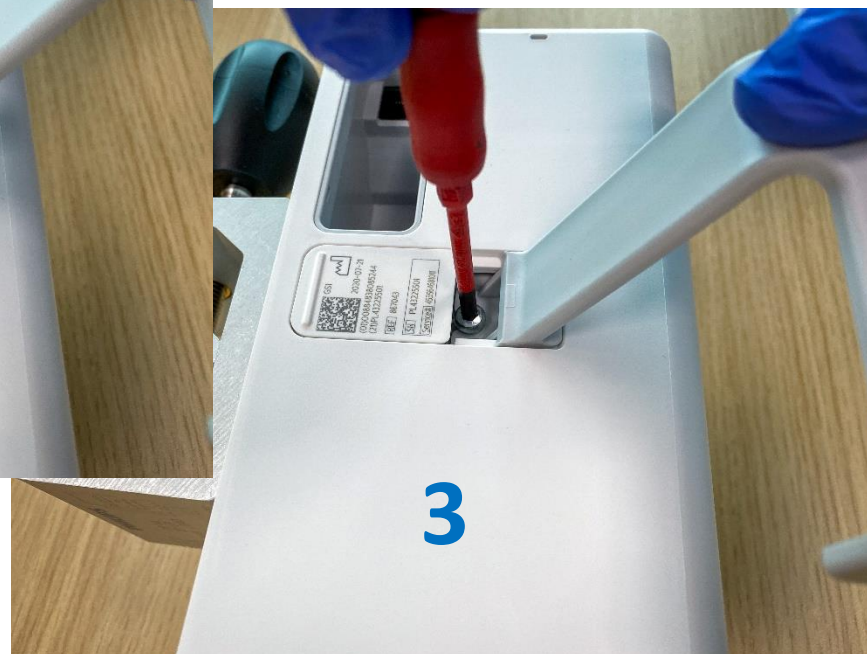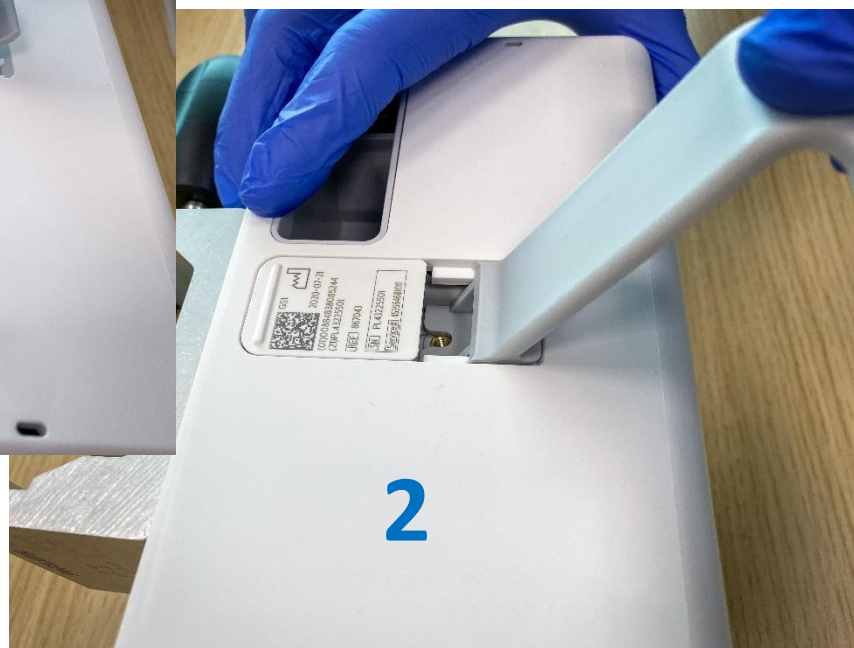

Uchwyt w pozycji poziomej (fabrycznie)
do montażu stacji na rurce lub szynie pionowej





Philips Medizin System
Boeblingen GmbH
Hewlett-Packard-Str. 2
71034 Boeblingen
Germany


Made in Poland

CE 0123 | CAN ICES-1

100-240V | 1.0-0.5A | 50/60Hz



LAN

Uchwyt w pozycji pionowej
do montażu stacji na szynie poziomej

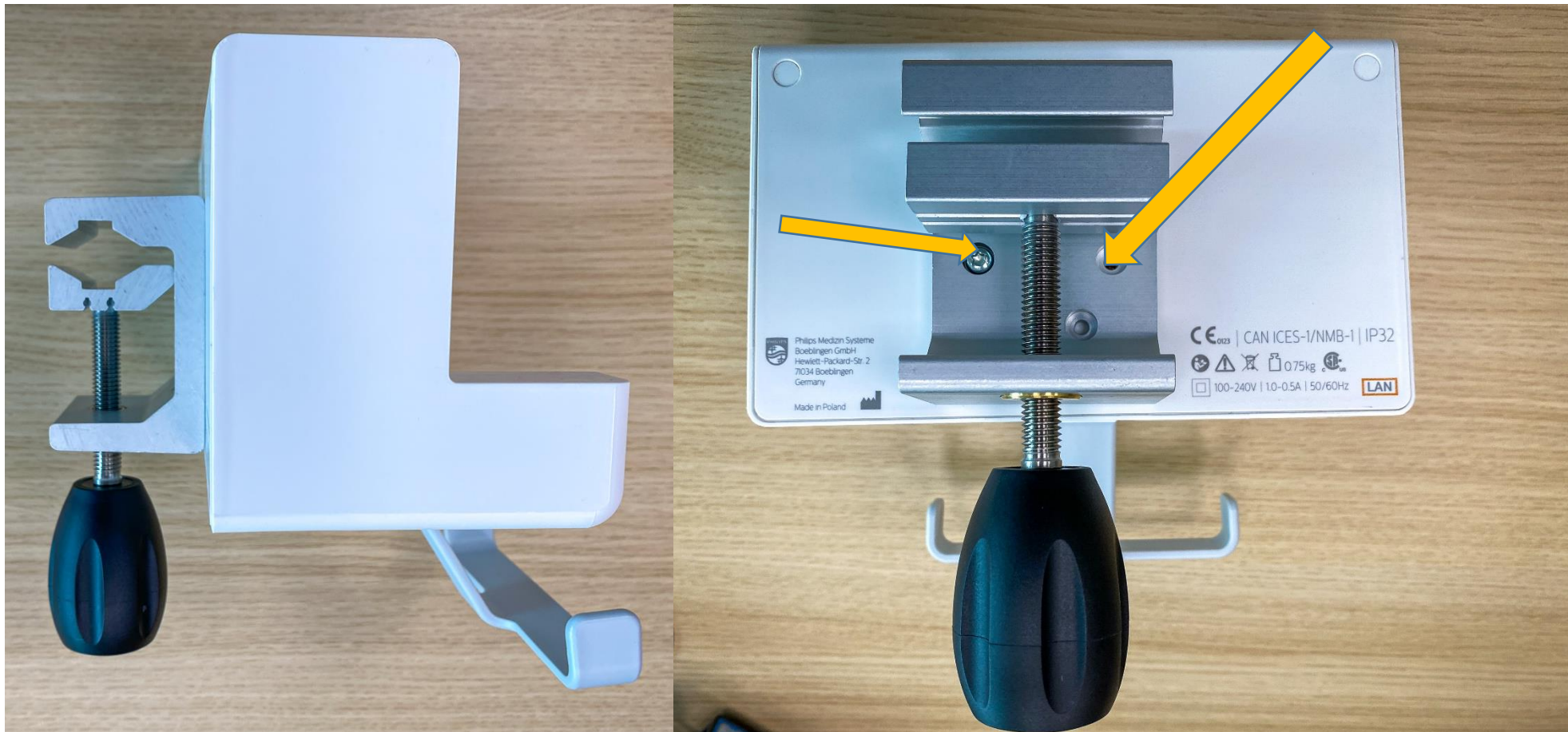



Mocowanie kardiomonitora w stacji

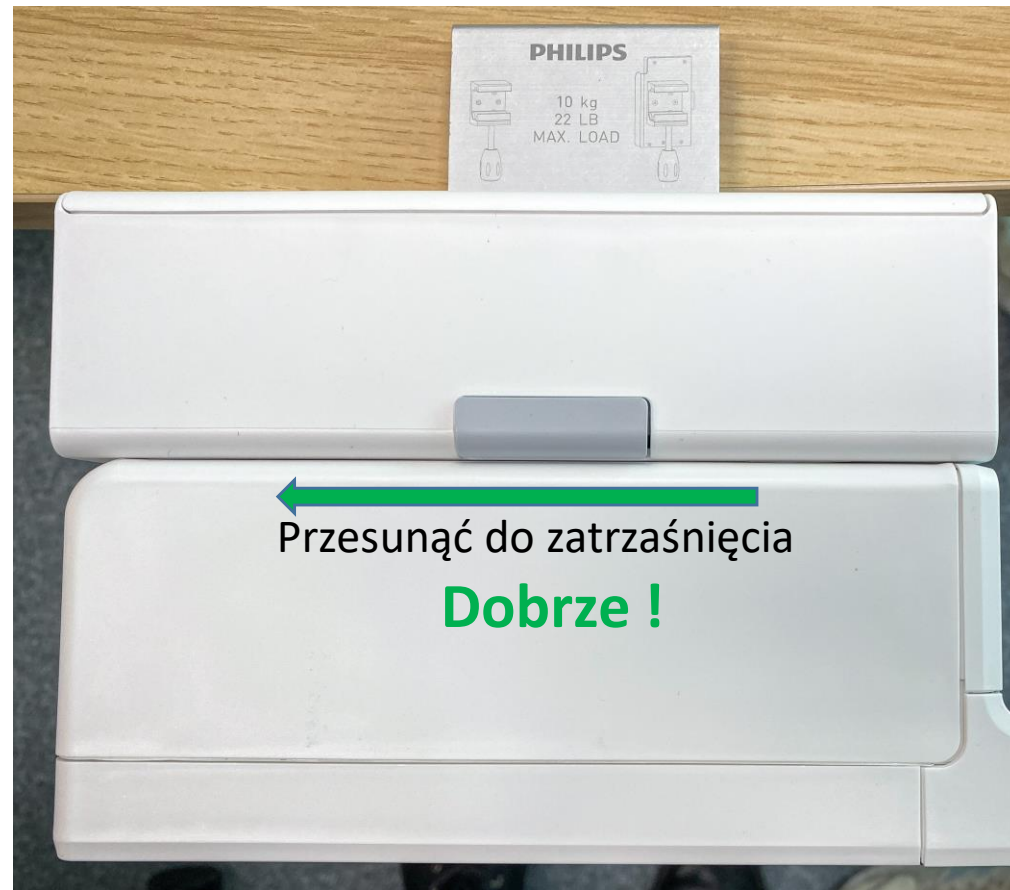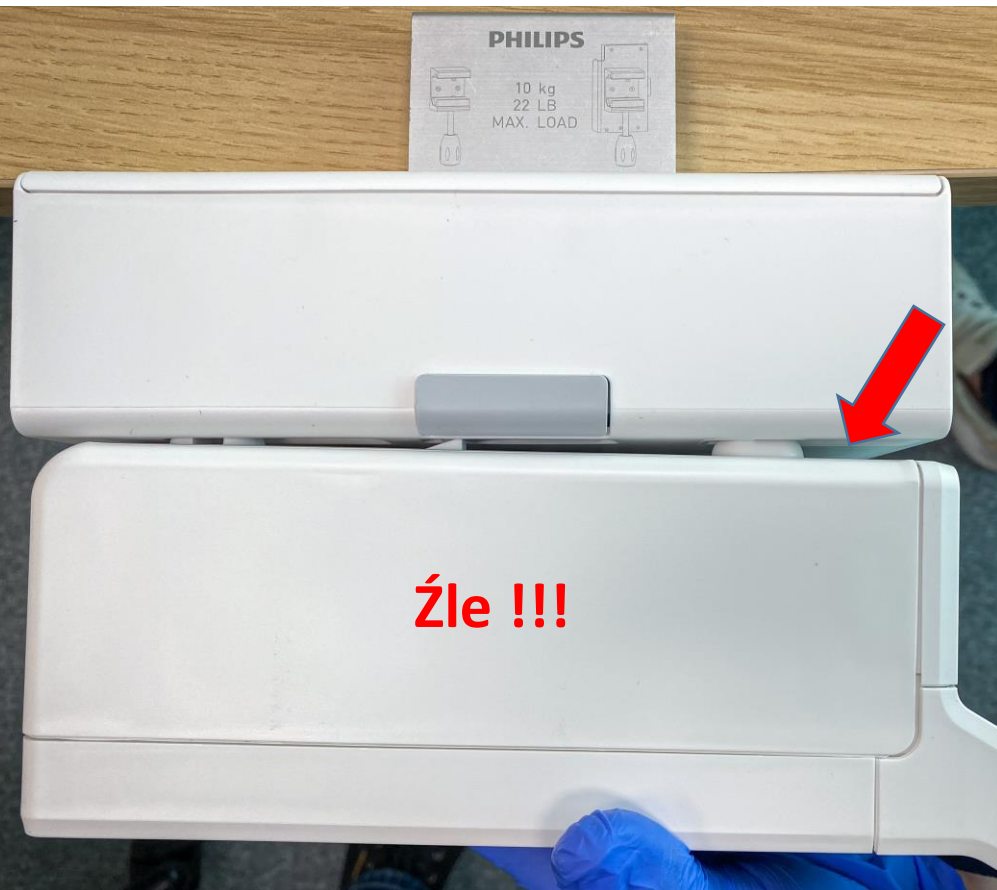



Wyjmowanie kardiomonitora ze stacji



