

Stojak GCX na podstawie jezdnej

do kardiomonitorów IntelliVue MX

Instrukcja montażu

Narzędzia

- Niezbędne narzędzia (brak w zestawie):
 - Śrubokręt krzyżowy
 - Klucz nasadowy 13 mm

Pudło z elementami stojaka



Pudło z elementami stojaka

Podstawa
jezdna

Pozostałe
elementy



Zawartość opakowania

Torebka ze
śrubami

Głowica
mocująca


Koszyk
na akcesoria

Podstawa


Uchwyt
stojaka

Rura
pionowa



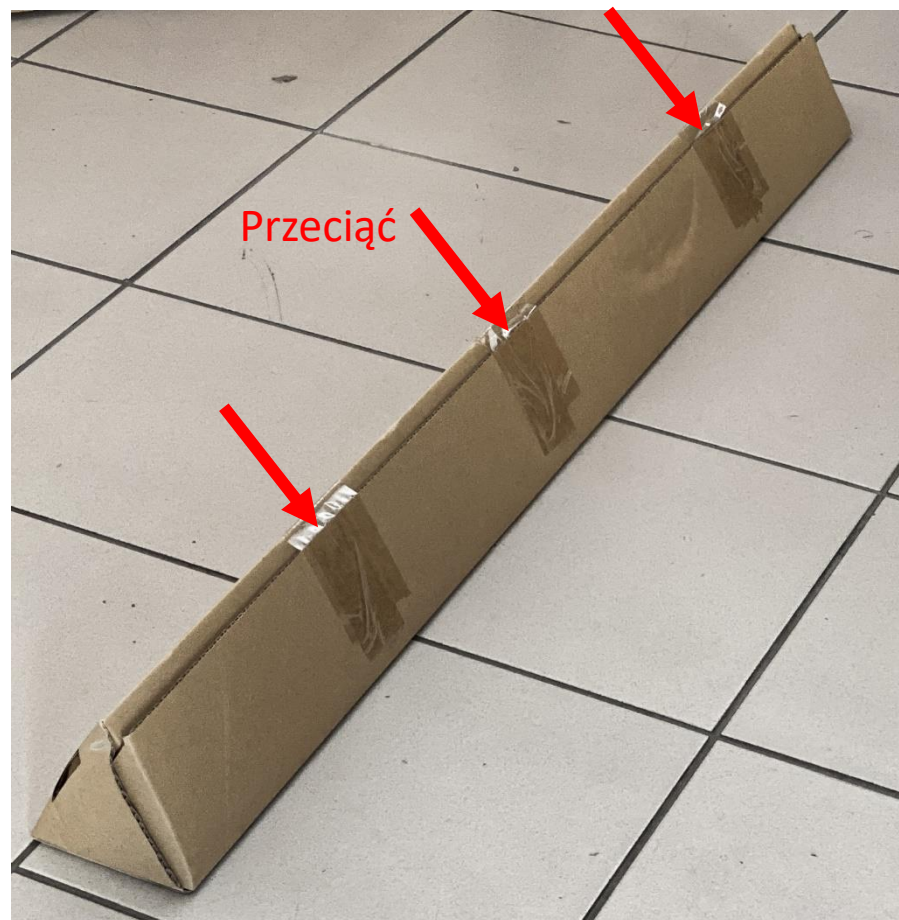



Montaż pionowej rury stojaka

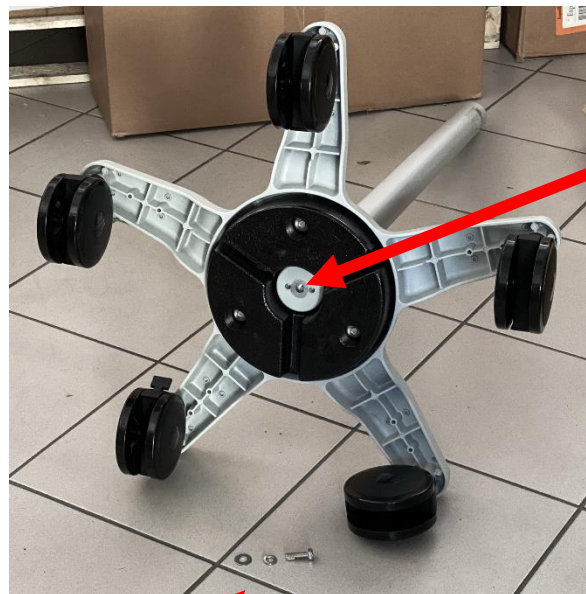

Śruba z
podkładkami



Klucz 13 mm

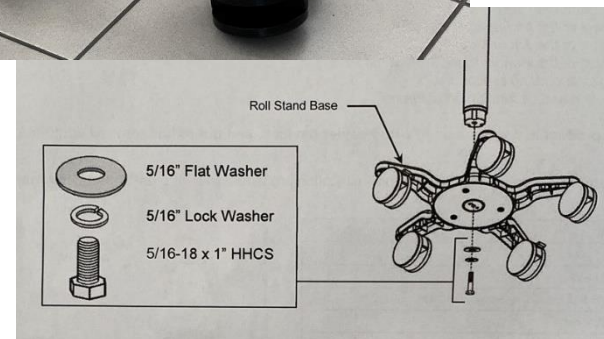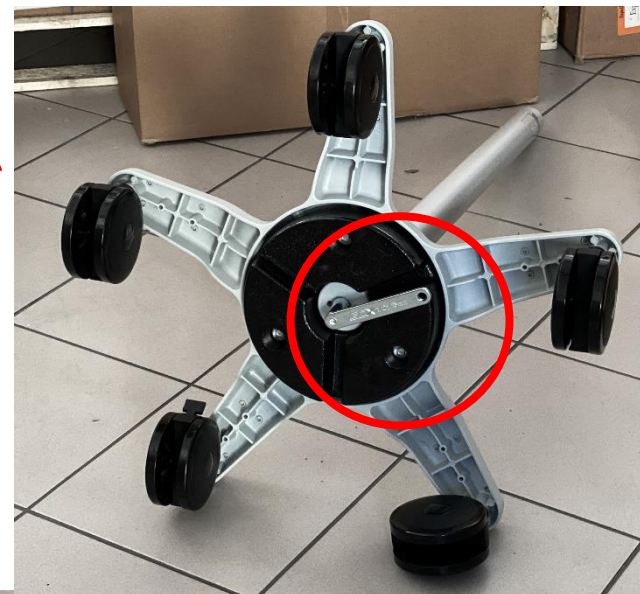



Koszyk z uchwytami mocującymi



Montaż uchwytych koszyka



Przed montażem głowicy !

Wsunąć koszyk od
góry, ustawić
na wymaganej
wysokości
(np. w połowie)
i dokręcić.



Śruby montażowe w zestawie



<<< Zbędne! (płytki i 2 duże śruby)

Naklejka na głowicę

Ważne!

2 śruby krótkie !

1 śruba dłuższa !



do montażu „wielbłąda”

Ważne !


3 długie śruby

do montażu głowicy


Montaż głowicy

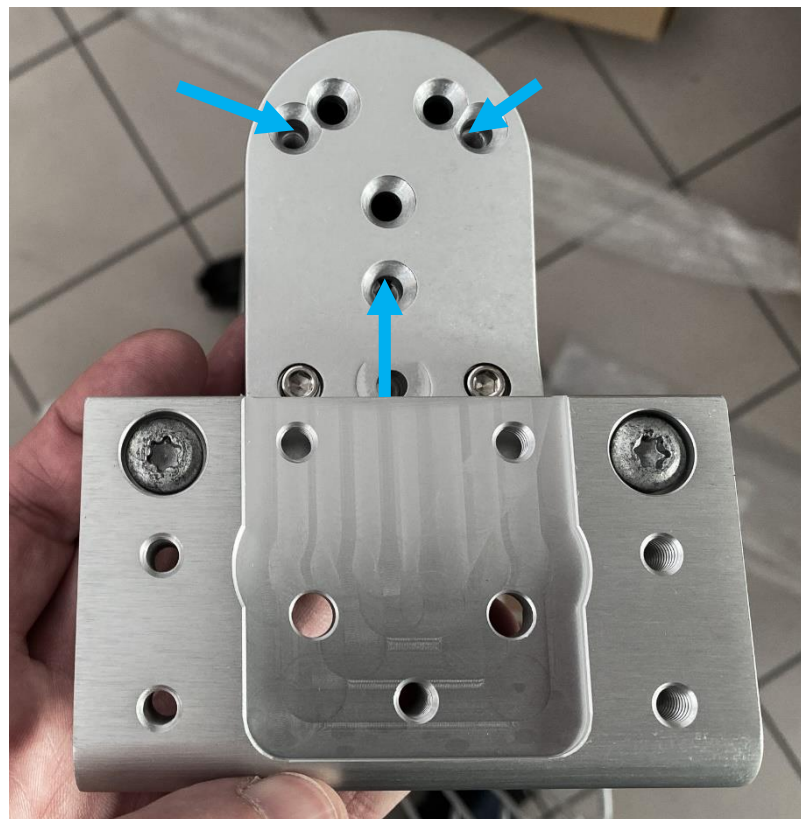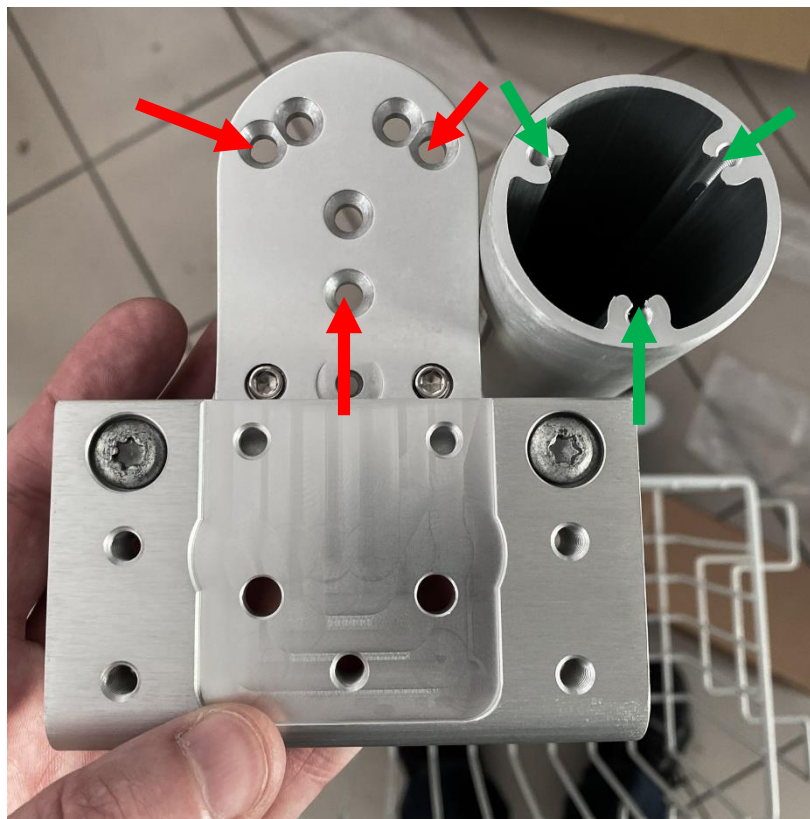

Montaż głowicy

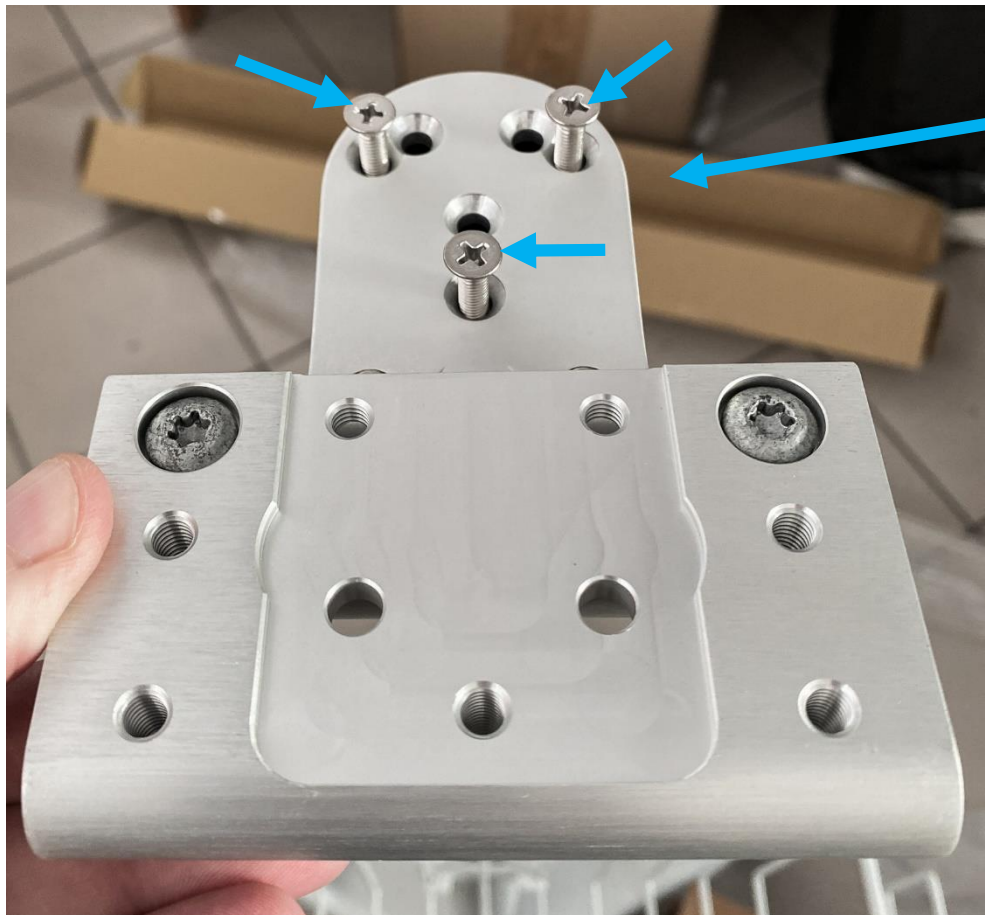

- Trzy długie śruby z zestawu

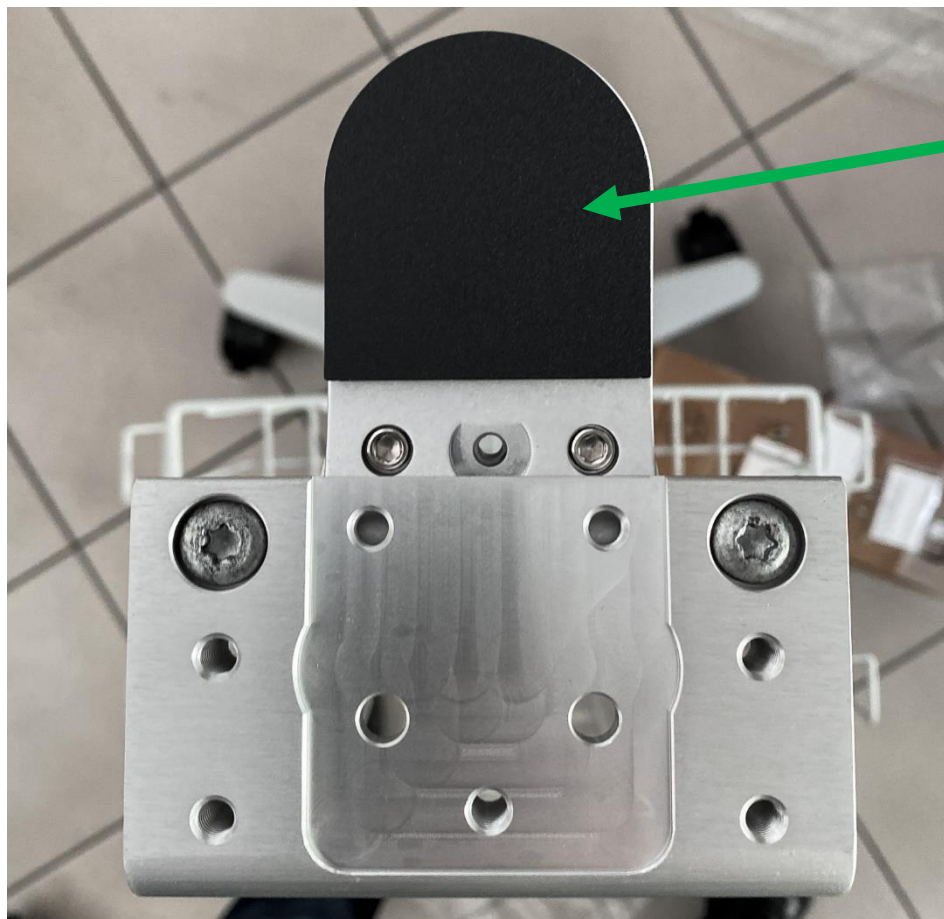

Naklejka na śruby mocujące głowicę

Regulacja oporu pochylania kardiomonitora



„Wielbłąd” mocujący kardiomonitor



Dostarczany z kardiomonitorom!
(nie w pudełku ze stojakiem!)

Użyć śrub dostarczonych ze stojakiem!
(2 krótsze, jedna dłuższa)

<<< Zbędne śruby i podkładki

Montaż „wielbłąda” do głowicy



Dwie
krótsze
z tyłu!

Jedna
dłuższa
z przodu!





Montaż uchwytu



Ustawić uchwyt
w wybranym
położeniu
i dokręcić.



Uchwyt z tyłu

< lub >



Uchwyt z przodu

Zakładanie kardiomonitora





Zdejmowanie kardiomonitora

Przycisk
zwalniający blokadę
(wolnoopadający)



